

RASK BRUKERVEILEDNING

WIDEX SOUNDCONNECT

Denne raske brukerveiledningen gir deg den viktigste informasjonen for å raskt komme i gang med SoundConnect.

Hva er Widex SoundConnect?

Widex SoundConnect er en diskret USB-dongel som kan brukes for å strøkke lyd direkte fra en datamaskin (PC) til kompatible Widex høreapparater.

Med hvilke programvareprogrammer kan Widex SoundConnect brukes?

Med hvilke dataprogrammer kan Widex SoundConnect brukes?

Widex SoundConnect kan brukes for å strøkke lyd fra hvilket som helst dataprogram som spiller av lyd, for eksempel Microsoft Teams, Zoom, Skype, Google Meet og andre musikk- og mediespillere.

Teknisk informasjon

Tilkoblingstype	USB-A "standard" kontakt
Kompatibilitet med høreapparater	Widex Moment, Widex Magnify Bluetooth-aktiverte høreapparater
App-kompatibilitet	Widex MOMENT, Widex MAGNIFY-apper
PC-oppsett	Plug-and-play*
Rekkevidde	8 meter innendørs, 5 meter utendørs

*I sjeldne tilfeller, hvor flere lydutgangsenheter er koblet til datamaskinen, kan det være nødvendig å aktivt velge Widex SoundConnect som lydutgangsenhet.

Hvordan pare Widex SoundConnect med høreapparater

1. Sett Widex SoundConnect inn i PC/laptopens USB-port.
2. Skru høreapparatene av og på for å sette dem i paremodus i tre minutter.
3. Trykk og hold inne knappen på baksiden av dongelen til lyset blinker blått

Forsikre deg om at høreapparatene og Widex SoundConnect er innenfor 1,5 meter fra hverandre.
4. Lysindikatoren vil bli en fast grønn (svak) når paret er fullført.

Lysindikatorer

Forklaring av de ulike fargene på LED-lyset er:

Blinkende hvitt	Ikke tilkoblet høreapparater
Blinkende blå	Parringsmodus
Blinkende grønn	Søker tidligere paret høreapparater
Fast grønn (svak)	Koblet til høreapparater, men ikke strømming av lyd
Fast grønn (sterk)	Strømmer lyd til høreapparatene
Fast oransje	Tjenestemodus
Blinkende rød	Feilmodus

